

# CRANEUM – Odontologia Diagnóstica

## Passo a Passo para instalação do Ortho Studio Viewer

### Introdução

Ortho Studio Viewer, é um poderoso programa para visualização e manipulação de modelos de estudo 3D

A CRANEUM adquiriu os direitos para distribuí-lo a seus clientes

Como o programa é controlado, é **necessário uma única vez, fazer o registro do programa**

Abaixo você terá todo o auxílio necessário para fazê-lo.

### Instalação

- Baixe o programa no site da CRANEUM ou insira o CD fornecido por nós


( existem duas versões uma para windows 32 bits e outra windows 64 bits, verifique qual é o seu )

- Execute o programa chamado:


- Instalador Ortho Studio CRANEUM Viewer.exe

A seguir você terá a seguinte sequencias de telas:


escolha português e clique OK

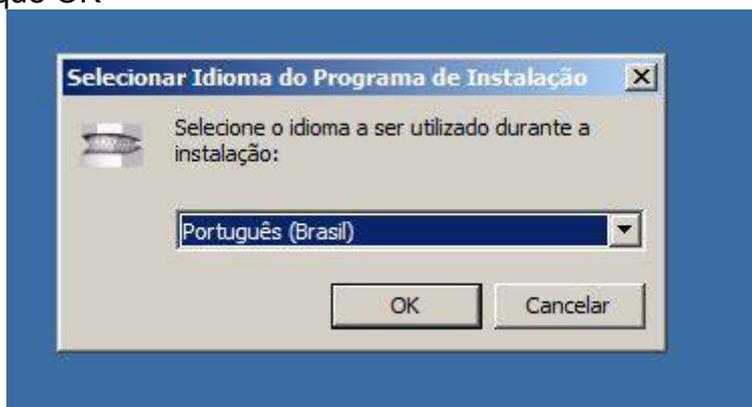


Clique em avançar

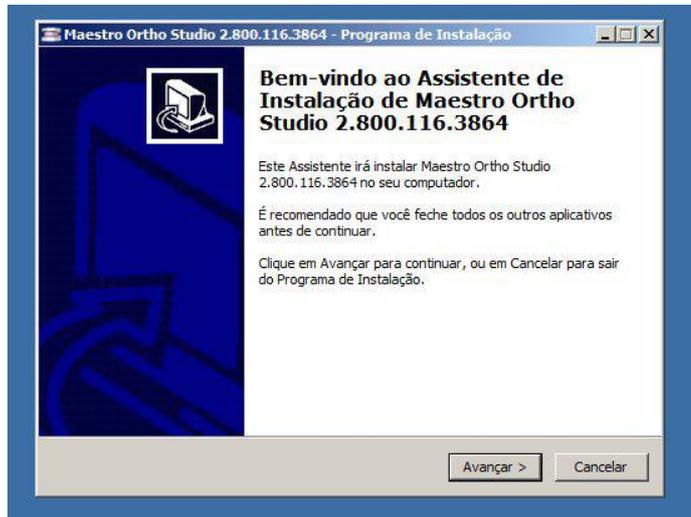


Aceite e Avançar

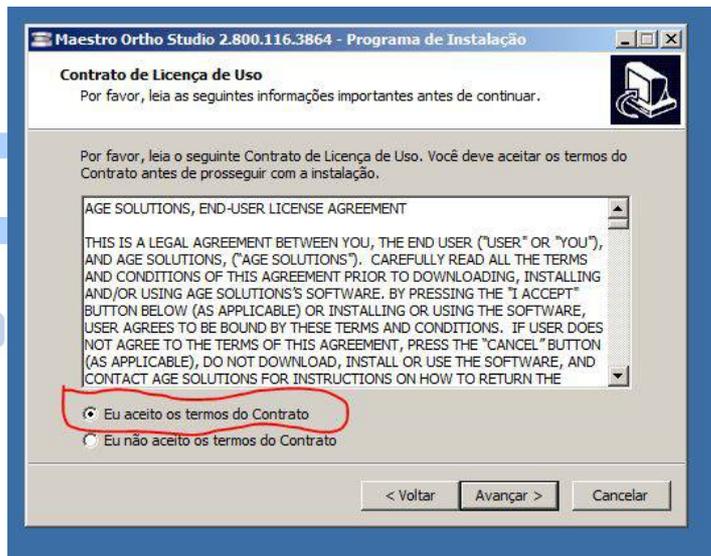


Avançar

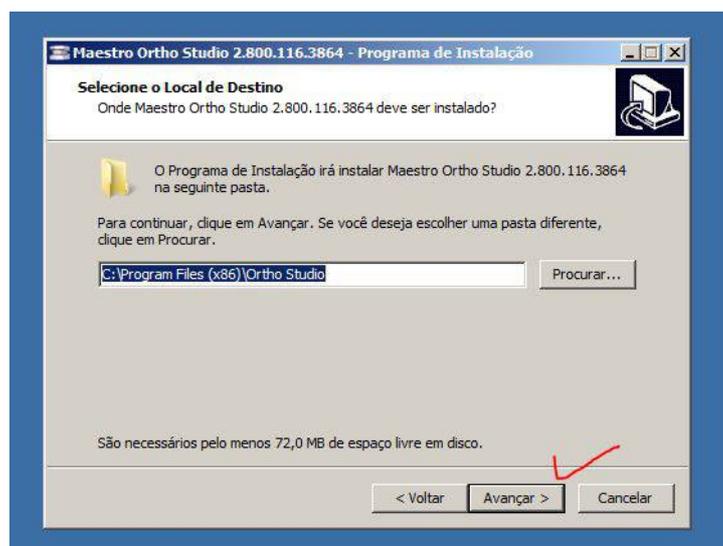


Avançar

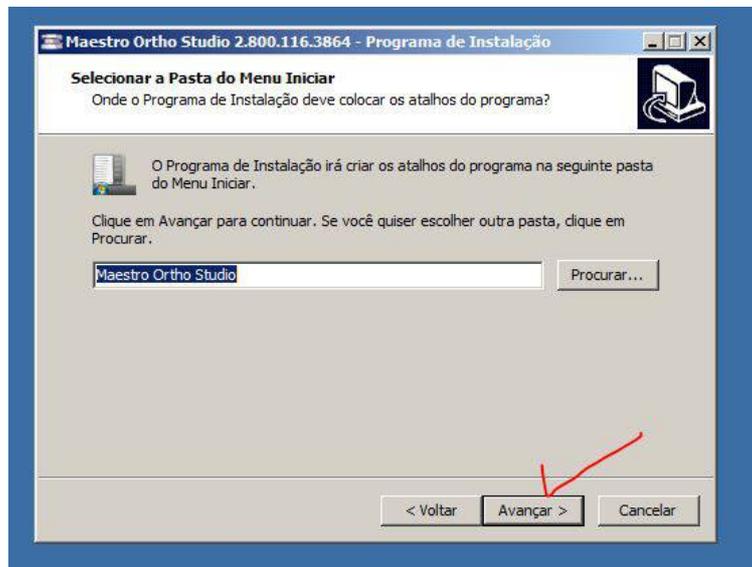


Avançar

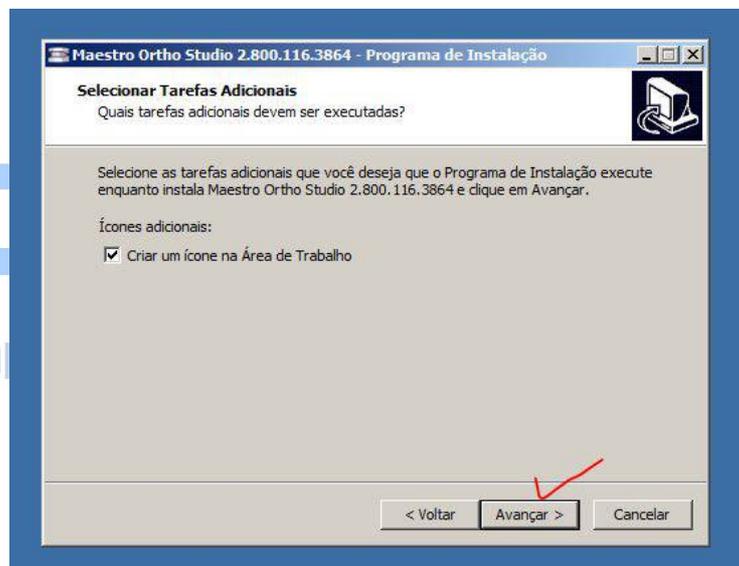

Instalar

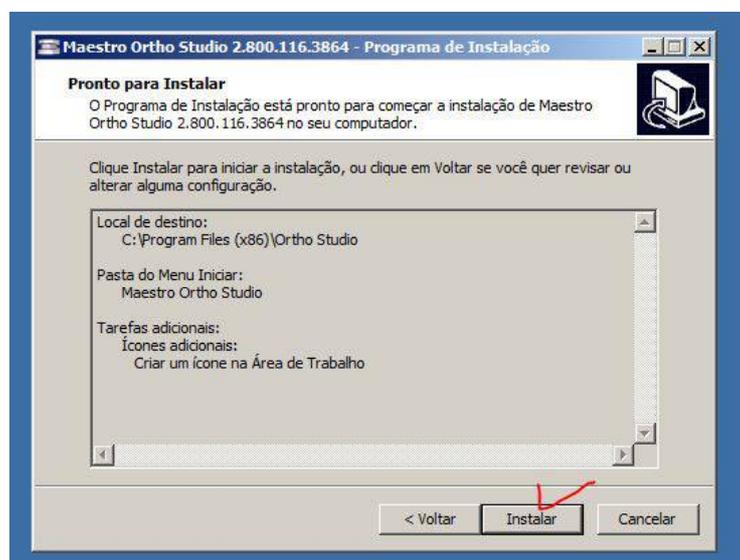


Clique Concluir

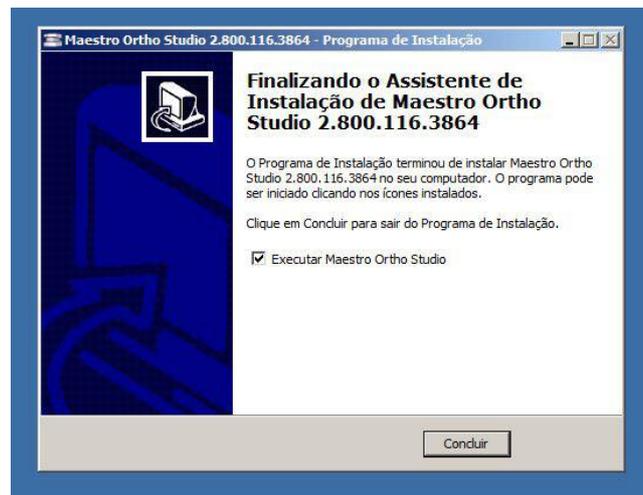

Surgira um Ícone do Orto Studio na Área de trabalho



O Windows 7 exige que você execute-o como administrador, para isso,  
- Clique com o botão DIREITO, e clique em “Executar como administrador”

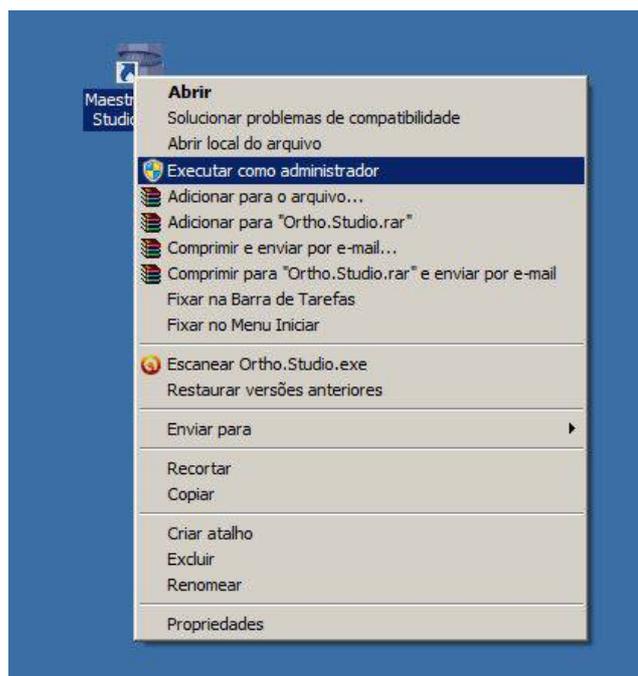


( depois você pode alterar as propriedades do atalho para que ele sempre seja executado como administrador)

Agora vem a fase da autorização:

- Você verá a seguinte tela:


- Clique em "Save product Key"

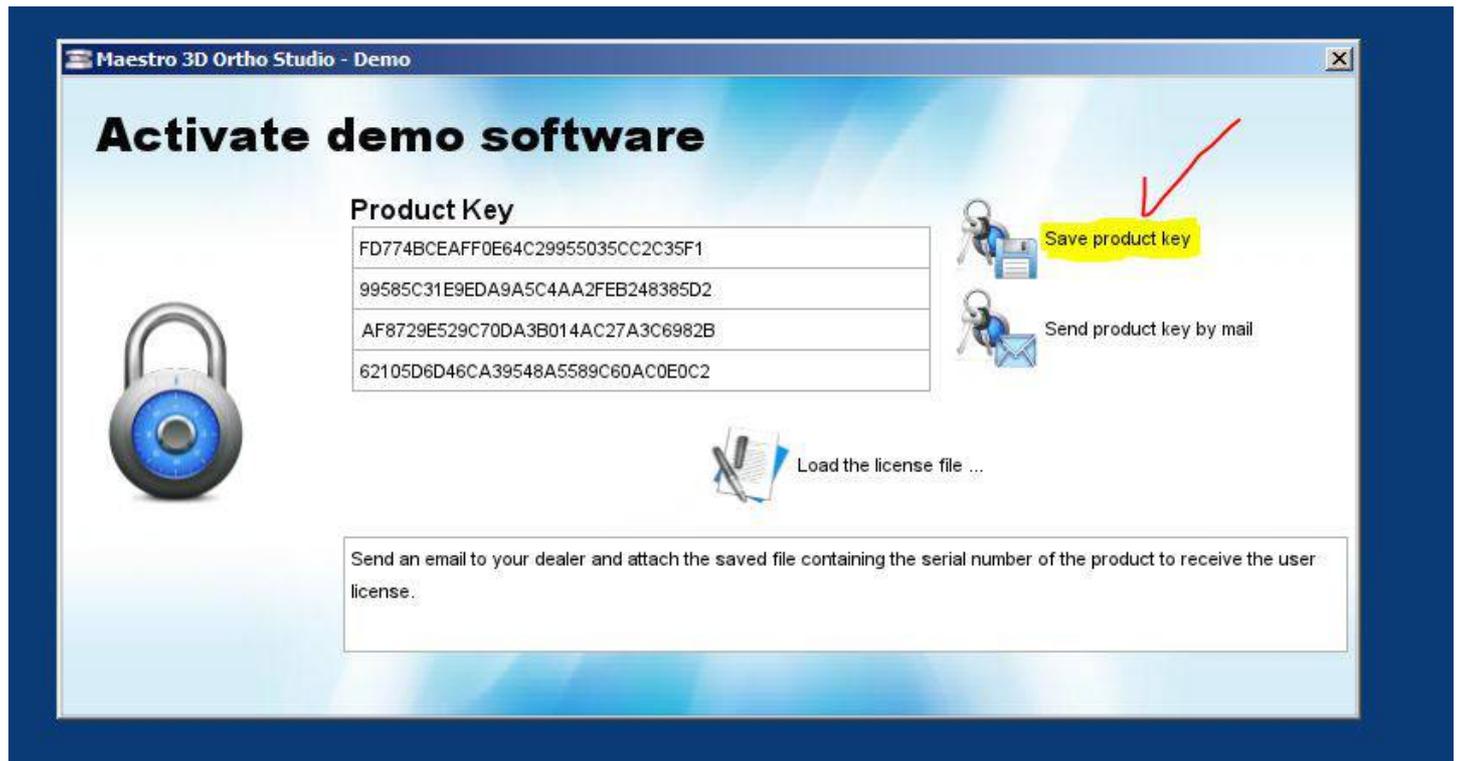

# CRAANEUM

Escolha salvar na Área de trabalho (desktop)

## RADIOLOGIA E DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA

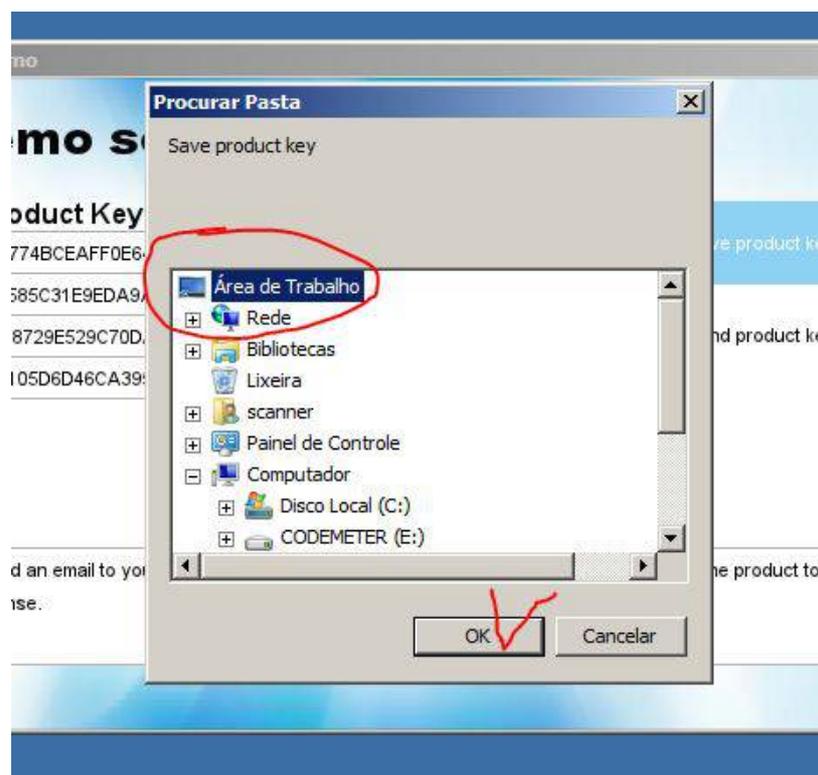

Pronto estamos com meio caminho andado  
você verá que surgiu um arquivo na área de trabalho:



Excelente, agora vamos enviá-lo ao fabricante para autorização:

Clique no link Abaixo:  
Abrirá uma página da Maestro:

<http://www.maestro3d.com/index.asp?page0=container&page1=maestro3d.dental.scanner.software.ortho.studio.viewer.key&page2=@maestro3d.splash>

ou [www.craneum.com.br/licecamaestro](http://www.craneum.com.br/licecamaestro)


**CRANEUM**  
RADIOLOGIA E DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA

Digite : Nome, País e E-mail

e clique em “procurar”

A screenshot of a web browser window displaying the Maestro3D website. The browser's address bar shows 'http://www.maestro3d.com...'. The website header features a banner with 3D dental models and the text 'MAESTRO3D'. Below the banner is a navigation menu with links: Home, Products, Technology, Video, Sales/Distribution and Partnership, Contact, and Fairs and Exhibitions. The main content area is titled 'Ortho Studio Viewer' and contains a registration form. The form asks for 'Name', 'Country', 'E-mail', and 'Product key'. There are input fields for each, a dropdown for 'Country', and a 'Procurar...' button. Below the form is a text area labeled 'paste your activation key here'. At the bottom of the form, there is a 'Submit' button and a small logo for 'noize acquired' with the text 'Digite as duas palavras' and 'stop-spam, read locals'.

- agora vamos procurar e selecionar o arquivo que salvamos anteriormente, ele se chama "ortho.studio.demo.product.key"

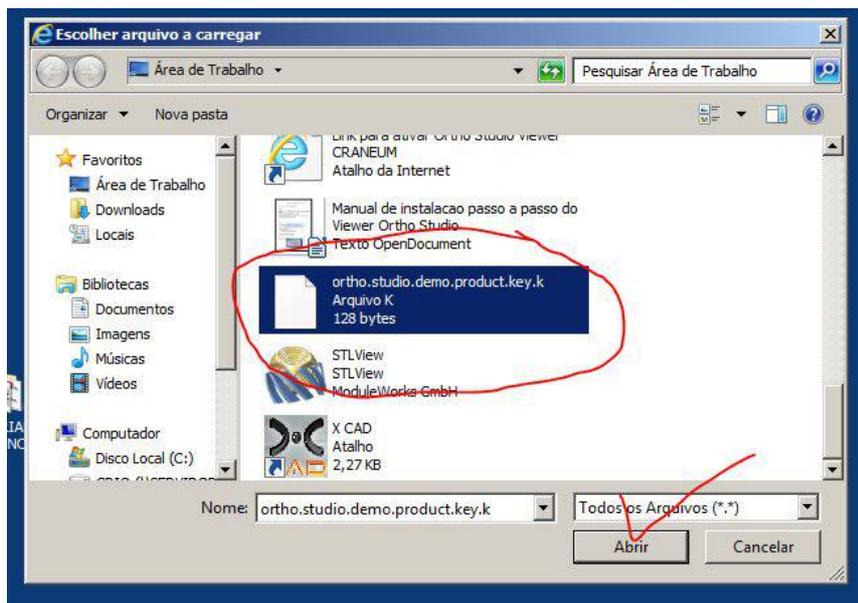

# CRANEUM


## RADIOLOGIA E DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA

- Preencha a campo de confirmação com a imagem das palavras que apareceram (sem espaço)
- Clique em "Submit"

Voce vera uma tela de espera como esta:




Em Seguida você deve receber esta confirmação:

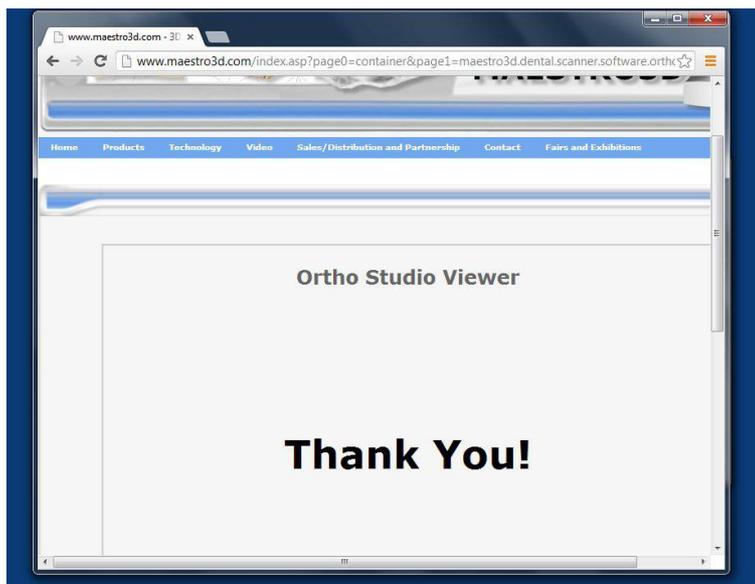

Agora feche o navegador Web e abra seu e-mail

Na caixa de entrada já deve estar um e-mail como este:

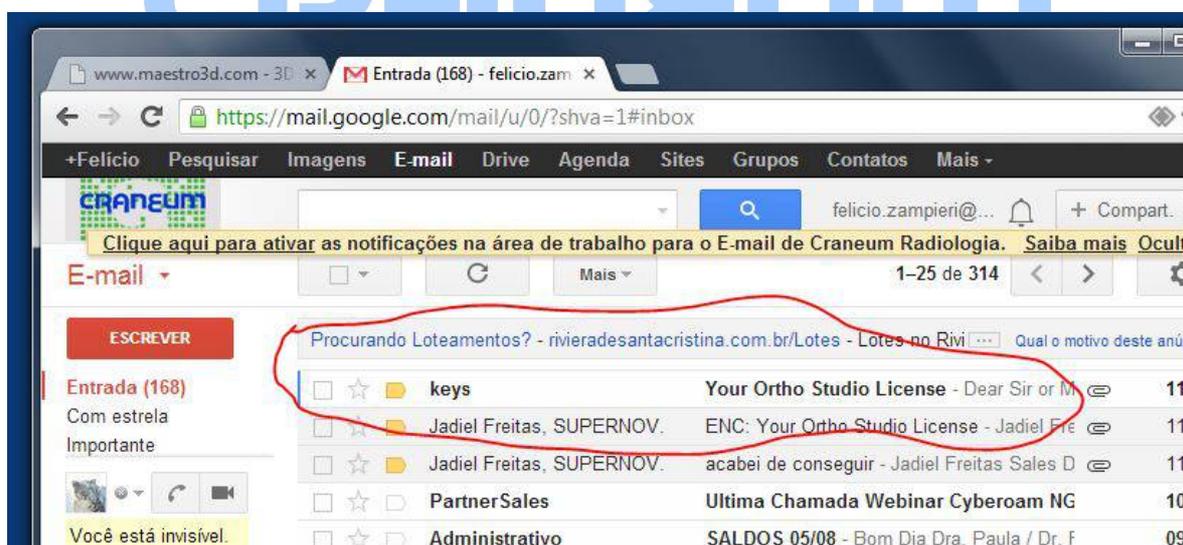


Salve o Arquivo que veio anexo ao e-mail em sua area de trabalho




clique novamente no programa Maestro Ortho Studio Viewer

Agora Clique em “Load Licence”

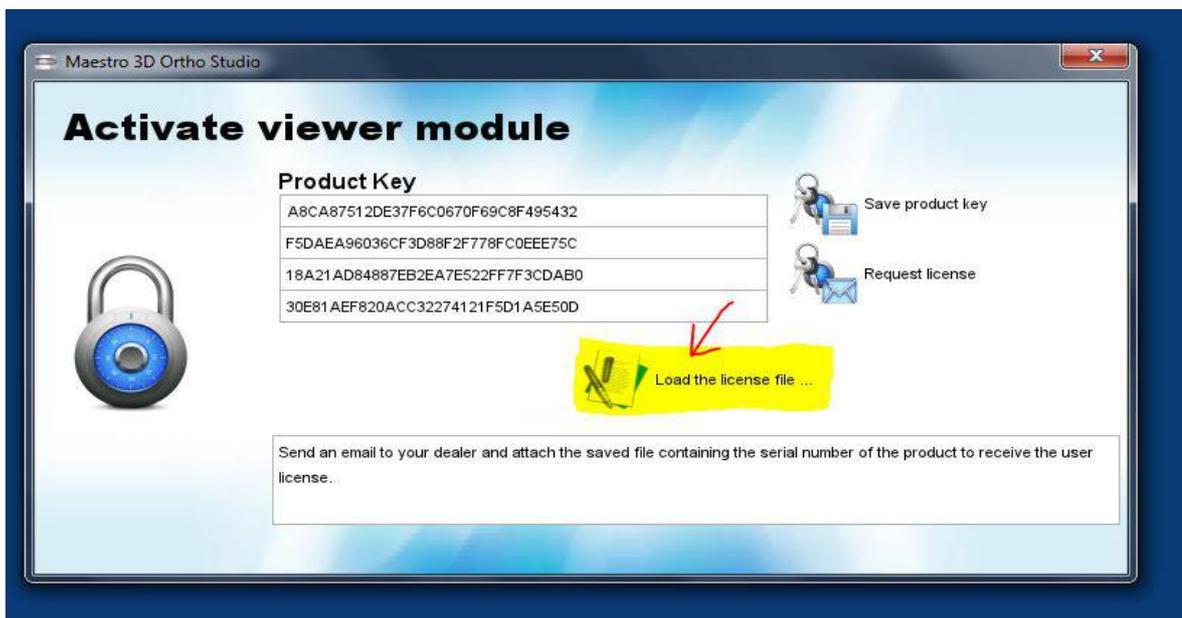



Escolha o arquivo “Ortho.studio.viewer.licence”  
clique em Open

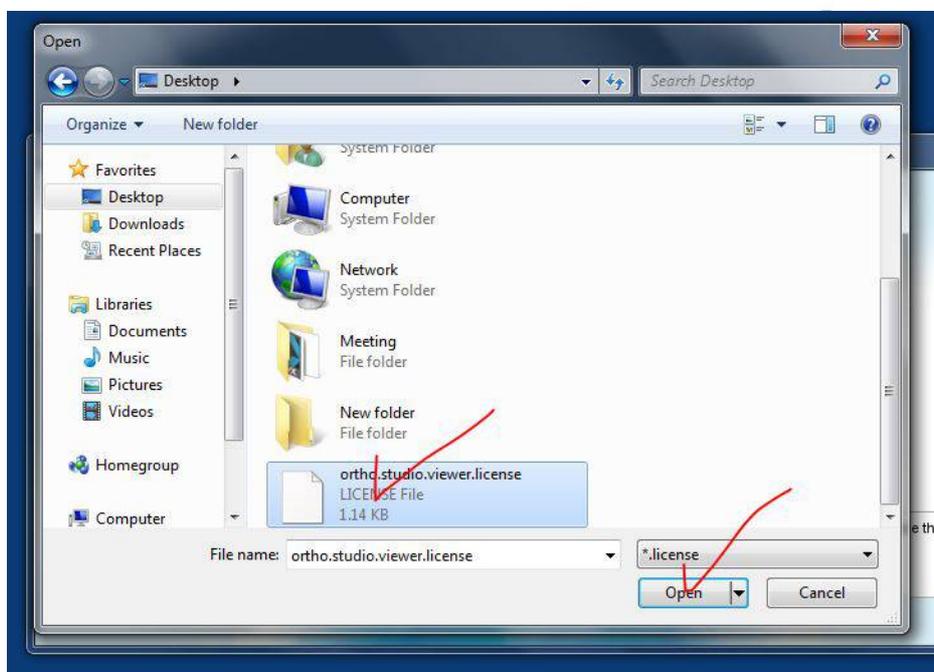

Pronto

O Programa deve abrir normalmente.

Este processo só é feito uma vez, agora você pode desfrutar de vários recursos que apenas o viewer fornecido pela CRANEUM e Maestro dispõem.

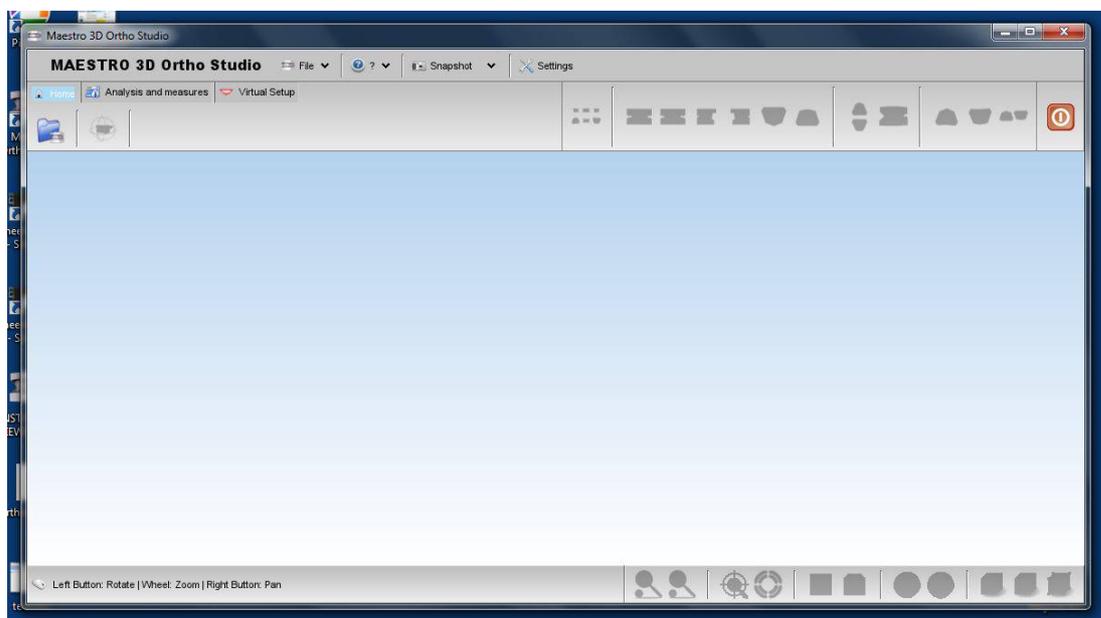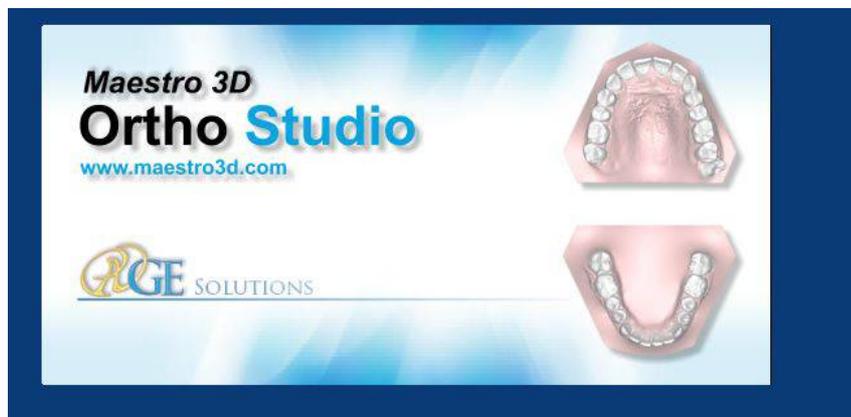

Caso tenha dificuldades, entre em contato conosco pelo telefone 011 4127 8757 em horário comercial ou pelo e-mail [contato@craneum.com.br](mailto:contato@craneum.com.br)

Mais informações e dicas de como usar o programa, acesse [www.craneum.com.br](http://www.craneum.com.br)

**CRANEUM**

**RADIOLOGIA E DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA**